


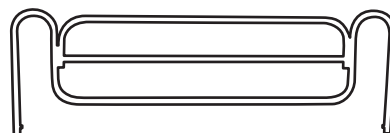

P558



Rail x2



Barre x2



Barre x2



Barre x2

Assemblage du produit :

La barre de lit P558 s'adapte à la plupart des tailles de matelas, de la taille simple à la taille king.

1. Retirez les rallonges de tube des barres transversales.
2. Ajustez les deux barres transversales de manière à ce que les tubes récepteurs soient aussi proches que possible de la largeur du matelas. Placez les barres transversales entre le matelas et le sommier à environ 150 cm l'une de l'autre.
3. Placez les barres transversales entre le matelas et le sommier à environ 150 cm l'une de l'autre.
4. Insérez les rails latéraux dans les tubes récepteurs et poussez jusqu'à ce que les boutons sortent complètement des trous de réglage de la hauteur.

