


5 Réglage de la hauteur de la poignée

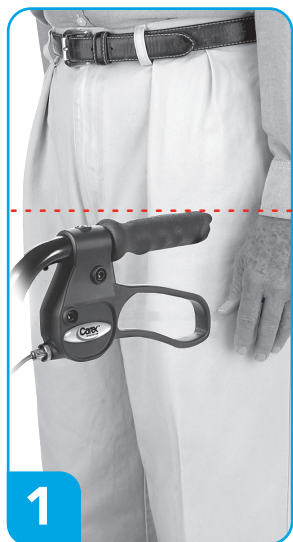

1



2




3

Utiliser les freins



Tirez vers le haut pour postuler freins

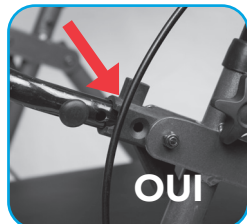


OUI



Sortie freins

REMARQUE : Le câble doit être placé à l'extérieur de la zone d'assise et des cadres.

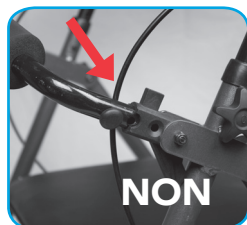

NON



Poussez vers le bas pour verrouiller freins

COMPASSHEALTH 42-A221_FR_00 © 2022

Manufactured for / Fabriqué pour : Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com
Phone / Téléphone 800.376.7263 • Made in China / Fabriqué en Chine

Carex[®]
caring for you

Déambulateur roulant en acier



1 Vérifier les pièces

E-clips et vis à main avec rondelles

Cadre de déambulateur roulant



Dossier



Poignées avec ensemble frein et roues arrières x2



Roues avant



REMARQUE : les articles réels peuvent différer légèrement de ce qui est montré.

AVIS IMPORTANT


Le système de frein à main monté sur ce déambulateur est conforme aux normes de qualité du fabricant. Le système de frein à main a été pré-réglé (ajusté) aux meilleurs paramètres de performance. Pour mieux vous convenir personnellement, veuillez suivre les instructions énoncées ci-dessous. Vous devrez peut-être ajuster les systèmes de frein à main de temps en temps car ils s'useront avec une utilisation normale. Les freins doivent être réglés de manière à ce que les roues ne bougent pas lorsque le frein est appliqué - si les freins ne peuvent pas être réglés correctement, **NE PAS** continuer à utiliser le déambulateur, rechercher une réparation ou un remplacement.

Instructions pour régler le système de frein à main

Maintenez fermement en place.
NE PAS tourner.

Pour **serrer** le réglage du frein à main, tournez l'écrou **dans le sens des aiguilles d'une montre**.

Pour **desserrer** le réglage du frein à main, tournez l'écrou **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre**.

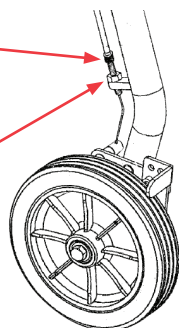


2 Assemblage de la poignée



1



Le câble doit être à l'extérieur du cadre.

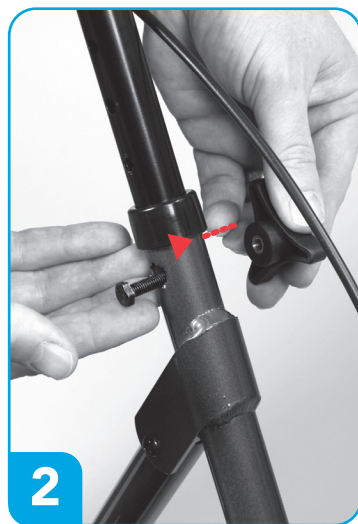

2

REMARQUE : Le boulon à tête hexagonale doit s'insérer dans le trou à tête hexagonale du tube. La vis à main est tournée vers l'extérieur.

3 Assemblage des roues avant et arrière



1



2

Insérez les roues arrière et avant à l'aide du clip en E et de la vis à main pour les fixer en place. Assurez-vous que tous les boutons sont bien serrés avant utilisation.



3

4 Assemblage du dossier et système de freinage



1



2

Appuyez sur les boutons latéraux et insérez le dossier. Dossier rabattable pour un rangement compact.